



QUICK-START GUIDE

Smart Connect



DIE SMART CONNECT IM ÜBERBLICK

Die Smart Connect ist ohne Programmierung in Connexx sofort einsetzbar. Die verschiedenen Funktionen gelten dann für das Universalprogramm.

- Folgen Sie zur Einrichtung/Kopplung den Anweisungen auf Seite 3.
- Für Hörprogramme mit individuellen Einstellungen in Connexx folgen Sie den Anweisungen auf Seite 4.



SMART CONNECT APP

Mit Hilfe der Smart Connect App lassen sich die Hörsysteme noch intuitiver bedienen: Hörprogrammwechsel, Lautstärkeänderung, Batteriestatus, u.v.m.

Individuelle Richtung des Richtkegels

Individuelle Breite des Richtkegels

QR-Code scannen oder in den Stores nach „Connexx Smart Connect“ oder „Audio Service“ suchen.

LED-ANZEIGE / BLUETOOTH-PAIRING

BITTE STELLEN SIE VOR DER EINRICHTUNG SICHER, DASS...-

- G3/G4-Hörsysteme vorhanden sind.
- die Smart Connect aufgeladen ist.
- G3/G4-Hörsysteme programmiert und funktionsfähig sind.
- das Trageband (Neckloop) an der Smart Connect angeschlossen ist.
- Wir empfehlen vor jeder Inbetriebnahme, die Smart Connect an Connexx anzuschließen, um ein evtl. vorliegendes Firmware Update durchzuführen.
- Stellen Sie vor dem Einschalten der Hörsysteme sicher, dass diese mindestens 20 Sekunden ausgeschaltet waren.

	Siehe Gebrauchsanweisung Smart Connect Seite	
<p>LADEVORGANG</p> <ul style="list-style-type: none"> Durchgehend orange: Die Smart Connect lädt auf. Durchgehend grün: Die Smart Connect ist vollständig aufgeladen. <p>BEI DER BENUTZUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> Blinkend orange nach Drücken eines beliebigen Knopfes: Der Akku ist schwach. Bei gleichzeitigem Drücken von sehen Sie durch Aufblinker der grünen LED, ob die Smart Connect bereits eingeschaltet ist. Ansonsten schalten Sie diese durch Drücken von für etwa 3 Sekunden ein. 		8
<p>1. ERSTE EINRICHTUNG/KOPPLUNG</p> <ol style="list-style-type: none"> Schalten Sie die Smart Connect durch Drücken von für etwa 3 Sekunden ein. Nun sucht die Smart Connect automatisch nach Hörsystemen und Bluetooth-Geräten: Schalten Sie die Hörsysteme ein. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die grüne LED und erlischt anschließend Bis das erste Bluetooth-Gerät (nicht unsere Transmitter) verbunden ist, bleibt die Smart Connect im Suchmodus: Sollten Sie jetzt kein Bluetooth-Gerät verbinden wollen, drücken, um den Suchmodus abubrechen. 		11 - 12
<p>2. BLUETOOTH-GERÄTE PAIREN (Hörsysteme müssen gekoppelt sein)</p> <ol style="list-style-type: none"> Halten Sie gleichzeitig gedrückt, bis die blaue LED blinkt: - die Smart Connect sucht nach BT-Geräten. Nach Verbindungsbestätigung auf Ihrem Bluetooth-Endgerät (ggf. die PIN „0000“ eingeben) leuchtet die blaue LED für 5 Sekunden und geht dann aus → Verbindungsaufbau erfolgreich: 		19 - 21
<p>3. UNSEREN TRANSMITTER PAIREN (Hörsysteme müssen gekoppelt sein)</p> <ol style="list-style-type: none"> Schalten Sie den Transmitter ein. Halten Sie gleichzeitig gedrückt, bis die blaue und die grüne LED abwechselnd blinken: Nach erfolgreicher Kopplung blinkt die blaue LED kurz, bevor Sie in ein Leuchten übergeht: → Verbindungsaufbau erfolgreich. Sollte das Streaming nicht automatisch beginnen, drücken, um den Suchvorgang abubrechen. Anschließend zweimal schnell drücken: → Verbindungsaufbau erfolgreich. 		22 - 23
<p>4. KOPPLUNGEN AUFHEBEN (Unsere Transmitter können nur per Smart Connect App entfernt werden!)</p> <ol style="list-style-type: none"> Um die Kopplung aller Bluetooth-Geräte aufzuheben, drücken Sie gleichzeitig für etwa 10 Sekunden. Das erfolgreiche Entkoppeln wird mit signalisiert. Anschließend sucht die Smart Connect erneut nach Hörsystemen und Bluetooth-Geräten: 		32

EINRICHTUNG IN CONNEXX / FIRMWARE UPDATES






Konfiguration

Hörsysteme

Signaltöne

Fernbedienungen

Zur Nutzung der Smart Connect als Fernbedienung, müssen Sie diese in Connexx aktivieren. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:

- Unter dem Menüpunkt **Konfiguration** finden Sie den Unterpunkt **Fernbedienungen**. Hier finden Sie alle konfigurierbaren Fernbedienungen für das angeschlossene Hörsystem.
- Wählen Sie die Smart Connect Fernbedienung mit einem Mausklick aus. Um die Smart Connect mit den Hörsystemen zu verbinden, drücken Sie auf . Ob Sie die Fernbedienung erfolgreich aktiviert haben, erkennen Sie an den Änderungen der folgenden Symbole:  →  →  → 

! Sofern ein Softwareupdate vorliegt, muss dieses sofort durchgeführt werden. Prüfen Sie regelmäßig, ob neue Updates verfügbar sind.

Programm-Bearbeitung

1	↓ Universell
2	Bluetooth Telefon
3	Audiostreaming
4	Smart Connect FM
5	Telespule
6	Aus

Als nächstes können die Hörprogramme für die Smart Connect eingerichtet werden:

- Klicken Sie auf **Programm-Bearbeitung** in der Menüleiste.

Nachstehend finden Sie die verschiedenen Hörprogramme, die je nach Anwendungsbereich der Smart Connect auf die Bedürfnisse des Kunden eingerichtet werden.

- Für das kabellose Telefonieren per Smartphone / Bluetooth-Telefon
- Für die Übertragung von Audiosignalen per Bluetooth (z.B. Smartphone Musik App)
- Für die Nutzung von FM-fähigen Geräten
- Für die Nutzung von induktiven Höranlagen oder Telefonen

Um die Einstellungen für die Smart Connect zu übernehmen, müssen Sie die Smart Connect und die Hörsysteme nach der Programmierung in Connexx erneut durch Ein-/Ausschalten beider Systeme verbinden.